

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## ELOFLEX D2

Olvassa el ezt a leírást, mielőtt használatba veszi Eloflexét, hogy biztonságosan, valamint környezetére, önmagára, és motoros kerekesszékeire veszélytelen módon tudja működtetni azt.



ELOFLEX

# Köszönjük, hogy az Eloflexet választotta!

Sokat jelent számunkra, hogy az Eloflexet választotta, mivel célunk az, hogy az emberek életét egy kicsit megkönnyítsük, és, hogy a fogyatékkal élők nagyobb szabadsághoz segíthessük. Reméljük, hogy Ön az Eloflexszel mindkettőt megtapasztalhatja.

Ez az útmutató fontos információkkal szolgál a biztonság, az általános használat és a termék gondozása szempontjából. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt először veszi használatba Eloflexét, olvassa el a teljes dokumentumot. Úgyszintén javasoljuk, hogy gyakorolja kerekesszéke használatát elzárt területen, nyílt és vízszintes terepen, mielőtt bármilyen egyéb környezetben használná. Az Eloflex motoros kerekesszék különböző felhasználók sokféle igényének megfelelően lett kialakítva. A döntést, hogy az Eloflex megfelel-e a jövőbeni felhasználó igényeinek, az eladónak mindig a jövőbeni felhasználóval együtt kell meghoznia. Cégünk nem vállal felelősséget olyan esetben, ahol ennek hiányában a kerekesszék nem lett a felhasználó igényeihez igazítva.

Az Eloflexet elsősorban gyári kialakításában célszerű használni. Ha a kerekesszék átalakítása szükséges, vagy bármilyen formában meg kell változtatni, azt csak egy segélyközpontban vagy magánál az Eloflexnél lehet megtenni. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a használati útmutatótól eltérő üzemeltetésből, illetve helytelen karbantartásból adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

*Minden jót kívánunk Eloflexéhez!*

**Vezessen óvatosan!**

The logo for Eloflex features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a stylized blue icon of a person sitting in a wheelchair, with a small blue circle above it representing the head.

Tartalom	Oldal
Felhasználási terület	3
Kinyitás	4
Szétszedés és összerakás	5
A joystick installálása	6
Töltési útmutató	6
Változtassa meg a szék szélességét	7
Manuális használat	7
Borulásgátló	7
Irányító kar	8
Navigálás a menüben	8
Háttámla	9
Lábtartó	11
A kartámasz felemelése	11
Szállítás és tárolás	12
Vezetés	13-14
Biztonság	15-16
Műszaki adatok	17
Kapcsolattartási adatok	17

# Felhasználási terület

## Típusbesorolás és felhasználási terület

Az Eloflex motoros kerekesszék olyan emberek számára lett kifejlesztve, akik nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak járni, de akik jól látanak, és rendelkeznek a testi, és mentális képességekkel egy motoros kerekesszék irányításához.

Az Eloflex motoros kerekesszék elég kompakt a belső térben való alkalmazáshoz, ugyanakkor kültéri használatra is alkalmas. A "Műszaki adatok" című fejezet, mely a dokumentum végén található tartalmazza a vonatkozó információkat, mint például a sebesség, fordulási sugár, hatótávolság, maximális emelési kapacitás, a felhasználó megengedett maximális tömege, és így tovább. Javasoljuk, hogy a "Biztonság" fejezet alatt található valamennyi biztonsági információval is ismerkedjen meg.

Az Eloflexet az EN12184: 2014 szabvány szerint tesztelték és jóváhagyták - B osztály (beltéri és kültéri használatra). Az Eloflex az ISO-7176, IEC60601, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint is jóváhagyottak. Az Eloflex elektromos kerekesszékek megfelelnek az MDR 2017/745 vonatkozó követelményeinek.

Az 1. osztályú megfelelőségértékelés / CE-jelölés az MDR 2017/745 VIII. melléklet III. fejezete szerint került kiadásra. Megfelelőségértékelési eljárás: MDR 2017/745 II. és III. melléklet. A CE jelölés érvénytelen, ha olyan pótalkatrésszel vagy kiegészítővel használják, amely nem került jóváhagyásra.

## Igények

Az Eloflex motoros kerekesszék célja sérülés vagy fogyatékoság kompenzálása, és ezért a következő esetekben ajánlott:

- Ha a felhasználó nem járóképes, vagy csak nagyon kevésbé, mely megnehezíti az otthonában való mozgást.
- Ha el kell hagynia otthonát, hogy a levegőn lehessen, vagy olyan helyekre jusson el, ahová mindennapi tevékenységek végzése szólítja el.
- Az Eloflex motoros kerekesszék használata bel- és kültéren egyaránt javasolt, ha mozgásszervi problémák miatt nem lehetséges hagyományos kerekesszékek használata, de motoros kerekesszék használata viszont megoldható.

## Kiegészítők

A töltő és az egyszerűbb szerszámokat tartalmazó csomag megtalálható az ülés alatt.

## Használhatóság

Csak abban az esetben használja az Eloflex kerekesszéket, ha az teljesen működőképes. Egyéb esetben önmagát és másokat veszélyeztethet. A következő lista nem tartalmazza az összes elképzelhető helyzetet, csupán olyan szituációkat ír le, amelyek a motoros kerekesszék használhatóságát befolyásolhatják.

- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha az akkumulátorok hibásak, vagy deformáltak.
- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a motor ugrik, vagy szokatlan hangokat ad ki.
- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a fékfunkciók hibásnak tűnnek.
- Ha a kerekek kopottak, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.
- Ha a biztonsági öv, kartámasz, ülés, háttámla, joystick vagy bármely egyéb alkatrész sérülését fedezi fel, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.
- Ha az elektronika (kábelek, akkumulátorok, töltők, stb.) hibáját fedezi fel, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.

## Gyártói jótállás

Az Eloflex jótállás keretében kicseréli a tönkrement alkatrészeket, amennyiben nem a felhasználó okozta a kárt. A jótállás nem vonatkozik a külső körülmények, pl. lopás, visszaélés, helytelen használat, villámcsapás vagy módosítás miatt bekövetkezett káresetekre.

## Élettartam

Az Eloflex becsült élettartama 5 év. Ugyanakkor a termék élettartama jelentős mértékben függ a használat mibenlététől és módjától. Az Eloflex élettartama jelentősen kitolódhat, ha gondosan, és csak az ebben a dokumentációban leírtaknak megfelelően van használva.

## Biztonsági szabályozás és veszélyek

KÉRJÜK, OLVASSA EL A 13-IK OLDALON TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓKAT AZ ELOFLEX HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN!



# Kinyitás

## Összeállítás

### Első lépés

Az összehajtott széket heyezze a földre, amint a jobb oldalon látható. Fogja a háttámlát és húzza felfelé a kinyitáshoz. Egy kézzel fogja az ülőpámát.



### Második lépés

Zárja le a rögzítő zárat - ez nagyon fontos!



**Nagyon fontos, hogy zárja le a zárat mielőtt a széket használatba veszi.**

## Összecsukás

### Első lépés

Nyissa ki a zárat, ahogy a jobb oldali képen látható.



### Második lépés

Egy kézzel fogja meg az ülőpáma elejét. Fogja meg a háttámla tetejét a másik kezével, és hajtsa előre. Tolja össze a széket, ahogy a jobb oldali képeken látható.



# Szétszedés és összerakás

## Szétszedés


### 1-es lépés

Hajtsa össze a kerekeszékét és állítsa fel. Győződjön meg róla, hogy a borulásgátlók előre fele állnak, amikor felállítja a kerekeszékét, tehát az alsó részen áll a kerekeszék.



### 2-es lépés


Nyomja le a reteszt amíg ki nem tudja emelni a felső részt az alsó részből. A felső rész azután meg tud állni a záró kampókon.

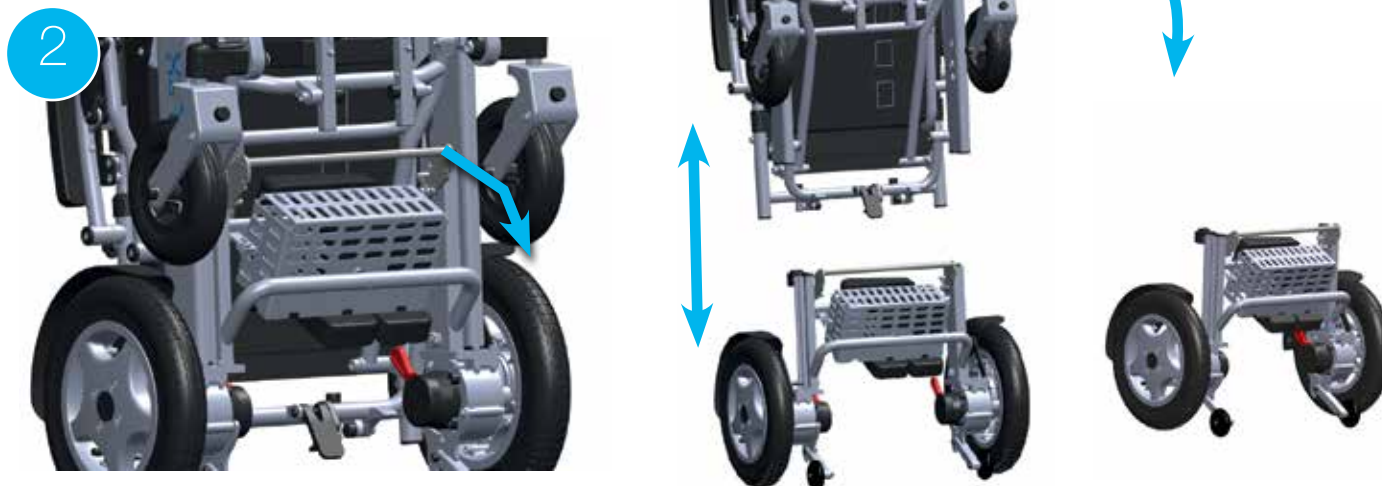

## Összerakás

### 1-es lépés

Emelje fel a felső részt és helyezze a megfelelő pozícióba, a vezetősinek segítségével. A retesz automatikusan záródik, de ellenőrizze, hogy kattanjon és ezután emelje is meg, hogy biztosan megfelelően záródott a rekesz. A vezérlés csatlakozói automatikusan kapcsolódnak amikor összeilleszti a két részt és a zár bezáródott.

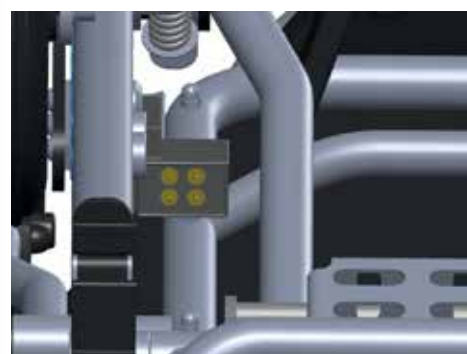

### 2-es lépés

Emelje fel a kerekeszékét üzem pozícióba és kapcsolja be hátul a reteszt, mielőtt használja a kerekeszékét.

# A joystick installálása

## Első lépés

Helyezze a joystickot a kartámasz alatti csőbe és a csavart szorítsa meg úgy, hogy a kívánt helyzetben álljon.



## Második lépés

Illessze össze a kábel összekötő elemeket, és finoman forgassa, amíg a tűk bele nem illeszkednek a lyukakba és a két összekötő elem vájatai összeilleszkednek. Ezután minden elemet csavarja össze a rögzítő ggyűrűket.



**FONTOS!**

**Vigyázzon nehogy megsértse, vagy meghajlítsa a konnektor tűit.**

# Töltési útmutató

## A feltöltés módja

Először kapcsolja ki az Eloflex kerekesszéket (a botkormányon található lámpáknak kikapcsolt állapotban kell lennie). Csatlakoztassa a töltőt a botkormány elülső részén található aljzatba. Gondoskodjon arról, hogy az érintkezők helyzete egymással megegyező legyen. Ezt követően csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy fali aljzatba.

A töltés menetét a töltőn található lámpa jelzi. A piros lámpa jelzi, hogy folyamatban van a töltés. Az akkumulátorok körülbelül három órát követően érik el a 90 százalékos töltöttségi szintet. Ekkor újból használhatja a széket.

5-8 órát követően a töltőn található lámpa zöld színre vált át, az akkumulátorok pedig teljesen



feltöltődtek. Töltés közben előfordulhat, hogy felmelegedik a töltő. Ez normális. A töltési utasításokat nagyjából öt órán át kell követni, ha a botkormányon az akkumulátor-töltöttség jelzőjén már három vonallal kevesebb látszik.

Fenntartó töltés esetén nem károsodnak az akkumulátorok, azonban az akkumulátor maximális élettartama érdekében javasoljuk, hogy válassza le a töltőt, amikor teljesen feltöltődtek



**FONTOS!**

**SOHA Ne csatlakoztassa A töltőt közvetlenül az akkumulátorhoz.**

az akkumulátorok. Az akkumulátorok töltését -10 fokig lehet elvégezni. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén nem fognak teljesen feltöltődni az akkumulátorok.

Ha fagypont alatti hőmérsékletekben használja az Eloflex-et, az hatással lesz a megtehető távolságra. Például -10 fok esetén a megtehető távolság akár 50%-kal csökkenhet.

# Változtassa meg a szék szélességét

Növelheti az ülés szélességét a kartámaszok kiszélesítésével, a szélesítő készlet segítségével. Választhat, hogy növeli-e az ülés szélességét 5 vagy 10 cm-rel.

## 1.lépés

Lazítsa meg mindkét oldalon a kartámaszt a két konzol kicsavarásával.

## 2.lépés

Illessze a szélesítő kart a szék és a kartámasz közé újra, továbbá a kartámaszt helyezze el a megfelelő magasságban.



# Manuális használat

Kapcsolja ki a kerekesszéket a kikapcs gombbal. Tolja előre a motoron található piros kart (lásd a képen), hogy lekapcsolódjunk a mágnes fékről. Ebben a pozícióban a kerekesszék tologatható.

**Fontos!** Ha a felhasználó segítség nélkül használja, akkor a mágnesféknek mindig bekapcsolva kell lenni!



**FONTOS!**

**SOHA ne lábbal, csak kézzel legyen a piros kapcsoló használva.**

# Borulásgátló

A borulásgátlókat nem kell beállítani. Rendszeresen ellenőrizze a borulásgátlók állapotát és ügyeljen arra, hogy meg legyenek húzva az anyák.



# Írányító kar



1 2 3

**1 Sebességjelző:** Minden vonal fehér = maximális sebesség

**2 Kilométer-számláló:** Ez mutatja az eddig megtett távolságot és az aktuális sebességet.

**3 Akkumulátorkezelő:** Jelzi, hogy mennyi energia van még az akkumulátorokban. Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, minden vonal fehér. Az akkumulátorok merülése során egymás után alszanak ki a vonalak. Akkor töltsé fel, amikor már három vonal kialudt.

## USB csatlakozó

**TIPP:**  
Telefon töltésre használhatja az USB csatlakozót a joystick alatt.



Töltő aljzat

Lámpa



**Írányító kar:** Kontrolálja a kerekesszék sebességét és a haladás irányát.




**Sebesség növelése:** Nyomja meg ha szeretné növelni a kerekesszék sebességét.



**Ki és bekapcsológomb:** Nyomja meg a kerekesszék ki/be kapcsolásához.



**Sebesség csökkentése:** Nyomja meg, ha csökkenteni szeretné a kerekesszék sebességét.

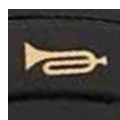

**Kürt:** Nyomja meg, ha jelezni szeretné, hogy Önre figyeljenek.



**Be/Ki lámpa:** Nyomja meg az "on" "off" gombot a világítás "ki" és "be" kapcsolásához.



# Navigálás a menüben

## Beállítások módosítása

Lehetősége van módosítani a szék beállításait, legyen az például a nyelv, a kürt hangereje vagy a mértékegységek.


1. A beállításokba való belépéshez nyomja meg a jobb oldali multifunkciós gombot. Ezzel megnyílik egy lista, különböző választási lehetőségekkel.



2. A több választást is biztosító listában a sebesség gombokkal tud fel/le görgetni.



3. Válassza ki az adott funkciót a jobb oldali multifunkciós gombbal (Enter [Bevitel]), vagy ugorjon vissza egy lépéssel a bal multifunkciós gomb (Return [Vissza]) segítségével.

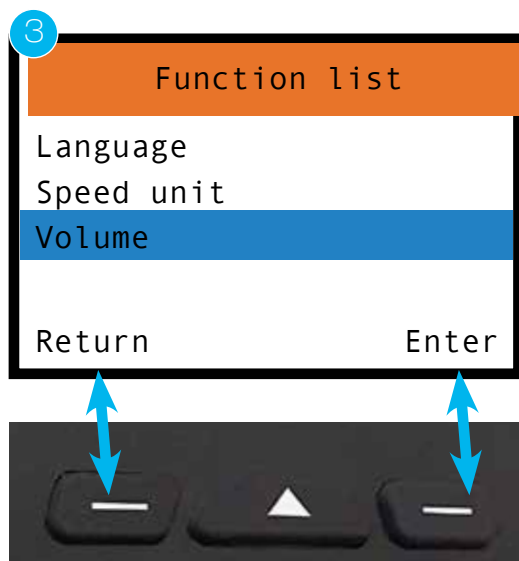

# Háttámla

---

## A háttámla beállítása

A hátrész dőlését úgy állíthatja be, hogy lenyomja az oldalt található karokat és megdönti a háttámlát, amíg kényelmes pozícióba nem sikerül állítania. Ezt követően engedje el a karokat, hogy rögzítse ezt a pozíciót.

2-22 fokos dőlésszög között változthat.



# Lábtartó

A könnyebb ki/beszállás érdekében a lábtartó felhajtható, ahogy az alábbi képen látható.



## Lábtartó beállítása

2 fix pozícióban állítható a lábtartó magassága.

Távolítsa el a műanyag kupakot a csavarról. **(1)**

Lazítsa meg a csavarokat. **(2)**

Tegye át a lábtartót a másik pozícióba. Ha nem illeszkedik a csavar, akkor igazítsa meg a lábtartót, hogy középpontba essenek a furatok **(2)**.



## A kartámasz felemelése

A kartámasz fel-lehajtásához, először nyissa ki a zárat, úgy, hogy félig elfordítja. Ezután a kartámasz felhajtható.



**Nagyon fontos, hogy miután lehajtotta a kartámaszt zárja le ismét! Fordítsa el a zárat a másik irányba fél fordulatot!**



# Szállítás és tárolás

- Felemelés előtt ajánlatos összehajtani a kerekesszéket.
- Az összehajtott kerekesszék betehető a csomagtartóba, vagy a gardróbba.
- Ha hosszabb ideig nem használja a kerekesszéket ajánlott teljesen feltölteni az akkumulátorokat, mielőtt elteszi a kerekesszéket.
- A kerekesszéket ajánlatos beltérben tárolni, ami fagymentes, száraz és jól szellőző. Tárolási hőmérséklet 0-30 fok között.
- Amikor a kerekesszéket buszon vagy mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas eszközön szállítja, az Eloflexet muszály rögzíteni a biztonsági pontokon, ami az also képen látható. Ne feledje, hogy az Eloflex nincs tesztelve autos ülésként! Azt ajánljuk, hogy a használó mindig üljön át az auto ülésre.
- Repülővel történő szállítás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal. Az Eloflex a IATA ajánlásait követi.



## Biztonsági szabályok vezetés közben

A kerekesszék billenése sérülésveszélyes.

- Csak olyan lejtőn használja, amely nem haladja meg a maximálisan megengedett lejtésszöveget.
- Mindig használjon billenésgátlót az Eloflexszel való utazás során.
- A lejtőn lefelé vezetés mindig alacsonyabb sebességgel történjen.
- Kerülje azokat a területeket, ahol fennáll a jeges vagy csúszós felületek veszélye.
- Soha ne próbáljon felfelé vagy lefelé lépcsőzni a motoros kerekesszékekkel.
- Soha ne haladjon olyan akadályokon, melyek magasabbak az ajánlott maximumnál.
- Kerülje a gyors kormányozásokat és a hirtelen irányváltásokat vezetés közben.

Elakadásveszély távoli helyen.

- Ne vezessen egyedül a szabadban hosszabb távon.

Vezetés közben sérülésveszélyes, ha valamelyik lába lecsúszik a lábtartóról a motoros kerekesszék alá.


- Vezetés közben mindig tartsa a lábát a lábtartó közepén.

Sérülésveszélyes, ha összeütközik más tárgyakkal a keskeny utakon.

- A legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel vezessen a keskeny helyeken

Fennáll annak a veszélye, hogy a kerekesszék megbillen, ha a billenésgátló eszközöket eltávolítják, megrongálják vagy olyan helyzetbe helyezik, amely eltér a szabályos rögzítéstől.

- A billenésgátlók mindig legyenek felszerelve a motoros kerekesszék használata esetén.
- A billenésgátlók csak szilárd felületen működnek. Puha felületeken mint pázsiton és havon elveszíthetik hatásukat. Ezért rendkívül óvatosan vezessen puha felületen.

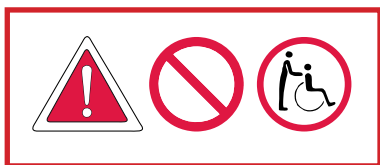

## Olvasás

kerekesszék használójának el kell olvasnia az itt leírt biztonsági és vezetési útmutatásokat mielőtt használni kezdi az Eloflex kerekesszéket.

## Gyakorlás

Gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja Eloflex kerekesszékének vezetését, irányítását egy segítővel, kezdetben nyílt, sík terepen, lehetőleg kültéren, mielőtt emberek között, boltokban, éttermekben, stb kezdené el használni.

- Előre haladáshoz tolja a joysticket lassan előre
- Megálláshoz engedje el a joysticket

## Hátramenet

Hátramenetbe tolja a joysticket lassan hátra. Megálláshoz engedje el a joysticket. Hátrafelé haladás előtt mindig nézzen hátra, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy nincsen az útjában sem személy sem más akadály.

## Forgás

Egyhelyben forgáshoz mozdítsa a joysticket finoman oldalra. Vigyázzon, hogy semmilyen akadály ne essen útjába forgás közben.

## Kanyarodás

Menet közbeni forduláshoz finoman tolja a joysticket abba az irányba, amerre fordulni kíván. Mindig csökkentse a sebességét fordulásakor.

## Akadály

Gyakorolja az akadályok kikerülését és az akadályokon való áthaladást. Menet közben mozgassa oldalra a joysticket az akadályok elkerüléséhez. Mindig csökkentse a sebességét, ha akadályhoz közelít.

## Gyors haladás

Gyors haladás. Nyomja a joysticket előre ha gyorsan kíván előre haladni. Mindig húzza vissza joysticket és csökkentse sebességét ha bizonytalannak érzi a haladást, illetve ha fordul vagy akadályhoz közelít.

## Áthaladás akadályon

Áthaladás akadályon. Haladjon lassan az akadályhoz és bizonyosodjon meg róla, hogy az első kerekek a haladás irányának megfelelően állnak. Ezután lassan tolja előre a joysticket és közben dőljön hátra az akadályon való áthaladáshoz. Az Eloflex kerekesszék számára a tesztelt és megengedett maximális akadály mérete 6 cm.

## Haladás emelkedőn és lejtőn

Haladás emelkedőn és lejtőn. Próbáljon egyenesen felfelé haladni az emelkedőn illetve lefelé haladni a lejtőn. Felfelé menet kissé dőljön előre, míg lefelé menet kissé dőljön hátra a súlypont közepén tartása érdekében. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú haladást emelkedőn/lejtőn és az esetleges oldalirányú megcsúszásokat kompenzálja ellenkező oldalirányba dőléssel. Mindig lassan haladjon emelkedőn és lejtőn. Kerülje a 9 fokosnál nagyobb emelkedőket/lejtőket.

## Liftek

Lift használata. Mindig ellenőrizze a lift ajtajának szélességét, valamint, hogy a lift ajtaja milyen gyorsan záródik, mielőtt beszállna a liftbe. Tartsa észben, hogy előfordulhat, hogy hátramenetben kell elhagynia a liftet, amennyiben a lift beltere nem elegendően nagy ahhoz, hogy megforduljon benne a kerekesszékekkel.

## Vezetés az úton

Elsődlegesen a sétáló utakat, járdákat, illetve a kerékpár utakat használja. Kerülje el a forgalmas utakat, erre csak legvégső esetben menjen, de ha lehet, kerülje el a biztonságos közlekedés érdekében.

## Átkelés úttesten

Átkelés úttesten. Amennyiben ez lehetséges, mindig egy kijelölt gyalogosátkelőhelyet válasszon az úttesten való átkeléshez. Ügyeljen az útját keresztező autókra. Használja a járda akadálymentesített szakaszát, ha van ilyen. Kerülje a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket.

## Általános biztonsági útmutatások

Az elektromos kerekesszék jelen dokumentumban ismertetett módoktól eltérő használata személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Az elektromos kerekesszék kizárólag jelen útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató "Típusbesorolás és felhasználási terület" pontját).

Az elektromos kerekesszék kizárólag jelen útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató "Típusbesorolás és felhasználási terület" pontját).

- Ne használja az elektromos kerekesszék, ha járművezetési képességei megromlottak például betegség, gyógykezelés vagy alkoholos befolyásoltág okán.

Az elektromos kerekesszék akaratlan mozgatása sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Kapcsolja ki a kerekesszék, mielőtt be- vagy kiszáll belőle vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön vagy egy másik személy vagy egy tárgy hozzáérhet a joystickhoz.
- Amikor a motorok kikapcsolt állapotban vannak a fékek nem működnek. Emiatt a kerekesszék kizárólag sík talajon szabad tolni, emelkedőn és lejtőn soha. Soha ne hagyja a kerekesszék emelkedőn/lejtőn vagy annak közelében kikapcsolt motorokkal.

Személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár az elektromos kerekesszék menet közbeni kikapcsolása például a BE/KI kapcsoló gomb használatával vagy egy kábel kitépésével, mivel ez a kerekesszék hirtelen történő megállását okozza.

- Vészfékezéshez engedje el a joystickot. Ekkor a kerekesszék automatikusan megáll.

A kerekesszékkel való kiesés sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Ne mozduljon előre, ne hajoljon előre a térdei között és ne hajoljon át a kerekesszék peremén, hogy például elérjen egy tárgyat.
- Mindig használjon biztonsági övet és állítsa azt be újra minden indulás előtt.

- Amennyire csak lehet álljon közel a másik székhez, amibe át kíván szállni.
- Az elektromos kerekesszék maximális terhelhetőségének túllépése személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.
- Az elektromos kerekesszék egyszerre egyetlen személy használhatja. Soha ne használja a kerekesszék egyszerre egynél több személy szállítására.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék sérülésének kockázatával jár a kerekesszék használata ha a zár nincs megfelelően a helyére rögzülve és használat közben kinyílik.

- Ha a kerekesszék zárja nincs a helyére kattintva megfelelően, akkor megtörténhet, hogy a szék használat közben hirtelen összecscuklik, amely a székből való kieséshez vezethet.
- Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a zárkampó a helyes pozícióban van mielőtt használja az elektromos kerekesszék.

Az kerekesszék összehajtása személyi sérülés és a kerekesszék összeütődésének kockázatával járhat.

- Mindig az útmutatóban ismertetett módon állítsa és csukja össze a kerekesszék.
- Figyeljen rá, hogy senki és semmi ne nyomódjon össze, amikor összeállítja és összecscukja a széket.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék sérülésének kockázatával jár a kerekesszék nedves, párás, nyirkos helyen történő használata.

- Az elektromos kerekesszék tilos zuhanyzás közben használni.
- Az elektromos kerekesszék tilos fürdés közben használni.



# Biztonság

---

## Átkelés vasúti síneken

Átkelés vasúti síneken. Mindig merőlegesen keljen át vasúti síneken, soha ne ferdén, rézsútosan. Soha ne kelljen át egyedül vasúti síneken, mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Meredek utak

Legyen óvatos, amikor meredek emelkedőkön, lejtőkön halad, mert a kerekesszék megbillenhet. Az Eloflex kerekesszék számára maximum 9 fokos meredekségű emelkedő / lejtő a tesztelt és megengedett. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Magas szegélyek

Legyen óvatos, amikor egy szegélyre fel- vagy szegélyről lehajt. Az Eloflex kerekesszék számára a tesztelt és megengedett maximális szegély magassága 6 cm. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Átszállás

Javasoljuk, hogy mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek az EloFlex kerekesszékbe történő ki- és beszállások során. Mindig kapcsolja ki a kerekesszékét mielőtt ki- vagy beszáll. Mindig hajtja fel a kartámaszt és lábtámaszt ki- és beszállás előtt, hogy megkönnyítse azt.

## Ne kísérelje meg javítani

Soha ne kíséreljen meg önállóan megjavítani egy elromlott elektromos kerekesszékét. Ha megkísérli önállóan megjavítani a széket, a jótállás érvényét veszti. Mindig forduljon az Eloflex-hez vagy az üzlethez, viszonteladóhoz, ahonnan a kerekesszékét vásárolta. Soha ne módosítsa önállóan a kerekesszékét.

## Nem játék

Soha ne engedje meg gyerekeknek, akik saját maguk nem használnak elektromos kerekesszékét, hogy az Ön Eloflex kerekesszékét használják vagy azon üljenek.

## Tisztítás

Soha ne tisztítsa Eloflex kerekesszékét folyóvízzel. Csak törölje le nedves ruhával. Ha az Eloflex kerekesszéke lassan nyílik és csukódik, megolajozhatja az csuklópontokat olajjal vagy szilikon spray-vel.

## Óvja a hőségtől

Soha ne hagyja Eloflex kerekesszékét közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy hóforrás közelében mert az akkumulátor károsodhat. Soha ne legyen nyílt láng közelében a kerekesszékkel. A kerekesszék - 10 és +45 °C között használható. Fagypon alatt a hatótáv csökkenhet.

## Tárolás

Tartsa távol Eloflex kerekesszékét gyermekektől, amikor nem használja. Tárolja házon belül, fagymentes, száraz, jól szellőző helyen. Tárolási hőmérséklet 0 és +30 °C között.

## A töltő

Soha ne takarja le a töltőt, amikor Eloflex kerekesszékét tölti vele. A töltő melegszik és ez baleset vagy sérülés kockázatával jár.

## Akkumulátor

Soha ne tárolja az akkumulátort közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, vagy olyan helyen, ahol fagypon alá eshet a hőmérséklet. Tárolja az akkumulátort száraz, jól szellőző helyen.



# Műszaki adatok

## MODELL D2

<b>Tömeg</b>	14 +16 kg akkumulátor nélkül
<b>Össztömeg</b>	32,5 kg akkumulátorral
<b>Hatótávolság</b>	30 km
<b>Max teherbírás</b>	160 kg
<b>Sebesség</b>	6,5 km/h
<b>Motor</b>	2 x szénkefementes motor
<b>Motorteljesítmény</b>	2 x 250 Watt
<b>Akkumulátor</b>	2 x Litium ION 10AH/24V
<b>Akkumulátor Hatás</b>	2 x 240 Wh
<b>Töltési idő</b>	3 óra
<b>Fordulókör</b>	89 cm
<b>Kerekek</b>	8 colos (tömör) / 12 colos (tömlős)
<b>Ülésmagasság</b>	54 cm
<b>Ülésszélesség</b>	45 (50, 55) cm
<b>Ülésmélység</b>	44-47 cm
<b>Háttámla</b>	2-22 fok között állítható
<b>Méret</b>	96x62x107 cm
<b>Összecsukott méret</b>	76x62x50 cm

## © Szerzői jog Eloflex

Ez a dokumentum olyan szerzői jogokat tartalmaz, amely miatt részben vagy egészben nem lehet másolni vagy sokszorozni az Eloflex írásos engedélye nélkül. Az Eloflex elzárkózik bármilyen nyomdai vagy sajtóhibától ami ebben a dokumentumban található és fenntartja a jogot a változtatáshoz.

## Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Amennyiben kérdése van, illetve segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel. Ha közvetlenül kapcsolatba szeretne lépni velünk, a kapcsolattartási adatainkat a [www.eloflex.eu](http://www.eloflex.eu) honlapon találja.



2021-05-08  
Version 2.0  
Sungo Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE  
Amsterdam, Netherlands  
SRN:NL-AR-000000247



**Eloflex**  
**Hammarbacken 4B**  
**191 49 Sollentuna**  
**SWEDEN**