

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## ELOFLEX S1

Olvassa el ezt a dokumentációt az Eloflex használata előtt hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan használja, és ne okozzon kárt magában, a környezetében vagy a robogóban.



# Köszönjük és sok szerencsét!

Köszönjük, hogy az Eloflex robogót választotta! Ez sokat jelent számunkra, mert az a célunk, hogy megkönnyítsük az emberek mindennapi életét, és nagyobb szabadságot biztosítsunk a fogyatékkal élőknek. Reméljük, hogy Ön az Eloflex robogóval mindkettőt megtapasztalhatja.

Hiszünk abban, hogy sokat fogja élvezni az új robogóját. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a használatról és az ápolásról. Javasoljuk, hogy olvassa át az egész dokumentumot, mielőtt első alkalommal használná az Eloflex robogót. Továbbá javasoljuk, hogy először egy elkülönített, nyitott és sík felületen tanulja meg az Eloflex használatát, mielőtt más helyzetekben is használná.

Az Eloflex robogó számos különböző szükségletekkel rendelkező felhasználókra lett tervezve. Azt a döntést, hogy az Eloflex megfelel-e a jövőbeni felhasználó igényeinek, az eladónak mindig a jövőbeni felhasználóval együtt kell meghoznia. Az Eloflex nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor a robogó nem a felhasználó igényeihez igazodik.

Az Eloflex robogót elsősorban gyári kialakításában célszerű használni. Ha a robogó átalakítása szükséges, vagy bármilyen formában meg kell változtatni, azt csak egy segélyközpontban vagy magánál az Eloflexnél lehet megtenni. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a használati útmutatótól eltérő üzemeltetésből, illetve helytelen karbantartásból adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

*Minden jót kívánunk Eloflex robogójához!*

**Vezessen óvatosan!**



Tartalom	Oldalszám
Felhasználási terület	3
Összecsukás	4
Az ülés hossz és -magasság beállítása	5
Kartámaszok felemelése	6
Borulásgátló	6
Manuális használat	6
Távírányító kulcs	7
Lámpák	7
Töltési útmutató	7
Vezérlőpanel	8
Ülésszélesség megváltoztatása	9
Szállítás és tárolás	9
Hibakódok	10
Biztonság vezetés közben	11
Általános biztonsági útmutatások	13
Technikai információ	15
Kapcsolattartási adatok	16

# Felhasználási terület

## Termékkategória és rendeltetési cél

Az Eloflex motoros robogót olyan személyeknek tervezték, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak jární, de akiknek megvan a látása, fizikai és mentális képessége, hogy irányítsanak egy robogót.

Az Eloflex Scooter kültéri használatra készült, de elég kompakt és rugalmas a beltéri használathoz is. A „Műszaki adatok” című fejezet, mely a dokumentum végén található, tartalmazza a vonatkozó információkat, mint például a sebesség, fordulási sugár, hatótávolság, maximális emelési kapacitás, a felhasználó megengedett maximális tömege, és így tovább. Javasoljuk, hogy a „Biztonság” fejezetben található valamennyi biztonsági információval is ismerkedjen meg.

Az Eloflex robogót az EN12184: 2014 szabvány „B” osztály (beltéri és kültéri használat) leírásának megfelelően történt. Az Eloflex szintén engedélyezett az ISO-7176, IEC60601 szerint, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint.

Az Eloflex elektromos robogók megfelelnek az MDR 2017/745 vonatkozó követelményeinek.

Az 1. osztályú megfelelőségértékelés / CE-jelölés megtörtént a VIII. sz. melléklet III. fejezettel összhangban az MDR 2017/745 rendeletében. Megfelelőségértékelési eljárás: II. és III. melléklet az MDR 2017/745-ben. A CE-jelölés érvényét veszti, ha olyan cserealkatrészeket vagy tartozékokat használ, amelyeket nem hagytak jóvá ehhez a termékhez.

## Igények

Az Eloflex robogó célja a sérülés vagy fogyatékosság kompenzálása, ezért az alábbi esetekben ajánlott:

- Ha a felhasználó nem, vagy csak rendkívül korlátozott mértékben képes jární, ezért nehézséget okoz számára a saját otthonában való közlekedés.
- Ha szüksége van arra, hogy elhagyja az otthonát, olyan helyek felkeresése céljából, amelyek rendszeres látogatása szükséges a mindennapi ügyek elintézéséhez.
- Ha a felhasználó számára kihívást jelent a mozgáskorlátozottság miatt eljutni a munkahelyére vagy különböző tevékenységek helyére, illetve azok elvégzése. Javasolt az Eloflex robogó beltéri és kültéri használata, ha a kézzel működtetett kerekesszékek használata mozgáskorlátozottság miatt nem lehetséges, azonban a felhasználó továbbra is képes a robogó megfelelő kezelésére.

## Kiegészítők

A töltő és az egyszerűbb szerszámokat tartalmazó csomag megtalálható az ülés alatt.

## Használhatóság

Csak abban az esetben használja az Eloflex robogót, ha az teljesen működőképes. Egyéb esetben önmagát és másokat veszélyeztethet. A következő lista nem tartalmaz minden lehetséges szituációt. Mindössze néhány olyan helyzetet mutat be, amelyek hatással lehetnek a robogó használhatóságára.

- Ne használja a robogót, ha az akkumulátorok hibásak vagy deformálódtak.
- Ne használja a robogót, ha a motor rángatózik vagy rendellenes zajt ad ki magából.
- Ne használja a robogót, ha úgy tűnik, hogy hiba van a fék működésében.
- Ha a kerekék elhasználódtak, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel.
- Ha bármiféle sérülést vesz észre a biztonsági övön, a kartámaszon, az ülésen, a háttámlán, a kormányon vagy a robogó más részén, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel.
- Ha bármilyen sérülést észlel az elektromos rendszerben (kábelek, akkumulátorok, töltők stb.), kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel.

## Jótállás

Minden esetben két év jótállás vonatkozik az Ön Eloflex robogójára. A jótállási feltételek összhangban vannak a vonatkozó nemzeti és általános feltételekkel, szabályokkal és rendelkezésekkel. A részletes jótállási feltételek letölthetők a [www.eloflex.eu](http://www.eloflex.eu) weboldalról. Felhívjuk figyelmét, hogy a jótállás időszaka alatt érdemes megőriznie az Eloflex eredeti csomagolását (amely összehajtogatható és félretehető).

## Élettartam

Az Eloflex robogók várható élettartama 5 év. Azonban a termék élettartama nagyban függ attól, hogy miként használják és kezelik. Egy Eloflex robogó sokkal hosszabb élettartammal rendelkezhet, ha megfelelően gondját viseli és kizárólag a jelen dokumentumban szereplő információknak megfelelően használja.

## Biztonsági előírások és kockázatok

KÉRJÜK, AZ ELOFLEX KEREKESZÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN OLVASSA EL A 11. OLDALON SZEREPLŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.



# Összecsukás

## Csukja össze

### 1. lépés

Az összecsatolt robogót helyezze a földre, amint a jobb oldalon látható. Hajtsa fel a kormányt úgy, hogy felfelé és előre emeli. Ezután rögzítse a kormányt a rögzítő segítségével, amely a kormány alján lévő zsanérban van. Ahhoz, hogy rögzíteni tudja a rögzítőt, fordítsa a fekete műanyag biztosítékot a rögzítő fölé.

1



2



### 2. lépés

Fogja meg a háttámlát, és húzza felfelé a kinyitáshoz. Tartsa meg egyik kezét a kormányra téve.

### 3. lépés

Csukja össze a robogó hátulján lévő rögzítőkampót - ez nagyon fontos! Győződjön meg róla, hogy a rögzítőkampó bepattan.



**Nagyon fontos, hogy a robogó használata előtt csukja össze a rögzítőkampót.**

## Összecsukás

### 1. lépés

Nyissa ki a rögzítőkampót, ahogy a jobb oldali képen látható.

### 2. lépés

Egyik kezével fogja meg az ülőpáma elejét. Másik kezével fogja meg a háttámla tetejét, és hajtsa előre. Hajtsa össze a robogót a jobb oldali képek szerint.

1



2



3



### 3. lépés

Nyissa ki a kormány alján lévő zárórögzítőt a biztonsági kampó kikapcsolásával és a kampó kinyitásával. Ezután hajtsa le a kormányt, és helyezze az összehajtott ülés tetejére.

# Az ülés hossz és -magasság beállítása

## Az ülés hossz növelése

Győződjön meg róla, hogy a robogó vezetési állásban van, és be van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felfelé mutató nyilat a robogó kiterjesztéséhez.



## Ülés hossz csökkentése

Győződjön meg róla, hogy a robogó vezetési állásban van, és be van kapcsolva. Az ülés és a kormány közötti távolság csökkentéséhez tartsa lenyomva a lefelé mutató nyilat.



## Ülésmagasság beállítása

Vegye le a robogó üléspárnáját. Húzza a fekete vezetékét az ülés elülső pereme alá. A vezeték kifeszített helyzetben tartásával egyidejűleg az ülés hátsó pereme a kívánt pozícióba állítható (három különböző pozícióban). Amikor az ülés a kívánt helyzetben van, az ülés első pereme a hátsó peremmel azonos magasságba kerül. Engedje ki a kábelt, hogy az ülés a hátsó peremmel egy magasságban lévő lyukban rögzüljön.





# Kartámaszok felemelése

A kartámaszok fel- és leemeléséhez először lazítsa meg a zárat a zárókar fél fordulatnyi elforgatásával. Ezután a kartámasz felhajtható.



**Nagyon fontos, hogy miután lehajtotta a kartámaszt, zárja le ismét! Fordítsa el a zárat a másik irányba fél fordulattal!**



## Borulásgátló

A borulásgátló eszközöknek két pozíciója van. Az egyik a vezetési helyzethez, a másik pedig ahhoz, amikor a robogó tárolás közben álló helyzetbe kerül. Könnyedén megváltoztathatja a pozíciót a borulásgátló eszközök kézi beállításával.

**FONTOS!** A borulásgátlónak mindig mindig vezetési állásban kell lenniük (a képen látható módon) a robogó használatakor.



## Manuális használat

Kapcsolja ki a robogót. Tolja előre a motoron található piros kart (lásd a képen), hogy lekapcsolódjunk a mágnes fékről. Ebben a pozícióban a robogó kézzel tolható.

**Fontos!** Ha a robogót kikapcsolt állapotban kell mozgatni, a mágneses zárat mindig ki kell kapcsolni.



**FONTOS!**  
**SOHA NE lépjen a piros állítókarra a lábával.**  
**Csak a kezét használja.**

# Távirányító kulcs

Az Eloflex robogót egy távirányító kulccsal együtt szállítjuk. A távirányító kulcsa a robogó lezárására/feloldására használható. Ha a robogó lezárt helyzetben van, nem lehet vezetni.



## Lámpák

Az Eloflex robogó elülső és hátsó világítással rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében. A világítás bekapcsolásához koppintson a kormány bal oldalán lévő világítás ikonra. Vannak féklámpák és irányjelzők is. Használja az irányjelzőket a kormány bal oldalán lévő két nyílal. A féklámpa akkor kapcsol be, amikor a robogó áll, amikor elengedi a gázt, és amikor a fékgombbal fékez.



## Töltési útmutató

### A feltöltés módja

Kezdje az Eloflex kikapcsolásával. Csatlakoztassa a töltőt a kormány elülső részén található aljzatba. Győződjön meg róla, hogy az érintkező elemek illeszkedjenek egymáshoz. Ezt követően csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy fali aljzatba. A töltés menetét a töltőn található lámpa jelzi. A piros lámpa jelzi, hogy folyamatban van a töltés. Az akkumulátorok körülbelül három órát követően érik el a 90 százalékos töltöttségi szintet. Ekkor újból használhatja a robogót. 5-8 órát követően a töltőn található lámpa zöld színre vált át, az akkumulátorok pedig teljesen feltöltődtek. Töltés közben előfordulhat, hogy felmelegedik a töltő. Ez normális. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében a töltésnek



körülbelül öt órán át kell tartania, amikor az akkumulátor kijelzőjén a mutató egyharmad szintre süllyed. Fenntartó töltés esetén nem károsodnak az akkumulátorok, azonban az akkumulátor maximális élettartama érdekében javasoljuk, hogy válassza le a töltőt, amikor teljesen feltöltődtek az akkumulátorok.



**FONTOS!**

**SOHA NE csatlakoztassa a töltőt közvetlenül az akkumulátorhoz.**

Az akkumulátorok töltését -10 fokokig lehet elvégezni. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén nem fognak teljesen feltöltődni az akkumulátorok. Ha fagypont alatti hőmérsékletekben használja az Eloflex robogót, az hatással lesz a megtehető távolságra. Például -10 fok esetén a megtehető távolság akár 50%-kal csökkenhet.

# Vezérlőpanel

Sebesség növelése

Be- és kikapcsoló gomb

Sebesség csökkentése



Az ülés hossz növelése

Semleges ülés hossz

Ülés hossz csökkentése

Lámpák

Bal oldali irányjelző

Fék



Jobb oldali irányjelző

Hangjelző kürt

**Információ kijelző:** A robogó kijelzője két különböző kijelzési móddal rendelkezik, az egyik a sebességre, a sebességfokozatválasztásra, a fényszórókra és az irányjelzőkre vonatkozó aktuális információkat mutatja. A másik kijelzési mód a robogón fellépő hiba esetén világít. Itt jelenik meg az aktuális hibakód, az akkumulátor feszültsége és az aktuális sebességfokozat.

Hátramenet

Gyorsító



**Akkumulátorkezelő:** Ez jelzi, hogy mennyi energia maradt az akkumulátorokban. Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, minden lámpa világít. Ahogy az akkumulátorok lemerülnek, a fények egyenként kialszanak. Töltsé fel, amikor a fények kétharmada kialudt.

## Vezetési útmutató

### Indulás

Amikor elindítja a robogót (be- és kikapcsológomb), parkolási üzemmódban van. Ezután nyomja meg a piros fék gombot, majd a szürke gyorsító gombbal indulhat el.

### Hátramenet

Az akkumulátorvezérlő kijelző alatt lévő szürke gombot nyomja meg, hogy hátrameneti üzemmódba kapcsoljon. Amikor a tolatási üzemmód be van kapcsolva, sípoló hang hallatszik (a robogó kijelzőjén is látható, hogy melyik üzemmód van bekapcsolva). Ezután a gázpedál megnyomásával tolathat. Ha ismét előre szeretne haladni, kattintson ismét a szürke gombra, hogy ismét vezetési módba váltsa.



# Változtassa meg az ülés szélességét

Az ülés szélességét növelheti a kartámaszok kimozdításával a szélesítő készlet segítségével. Megnövelheti az ülés szélességét 5 vagy 10 cm-rel.



## 1. lépés

Lazítsa meg a kartámaszokat mindkét oldalon a két rögzítőelem kicsavarásával.

## 2. lépés

Illessze a bővítőt a szék és a karfa közé.  
Szerelje vissza a kartámaszokat.

**A szélesítő készletet attól a viszonteladótól rendelheti meg, ahol a robogót vásárolta.**

# Szállítás és tárolás

- Az összecukott robogó egy nagyobb autó csomagtartójában is elhelyezhető. Használjon rámpákat, hogy a robogót bejuttassa az autóba.
- Az összecukott robogó a jobb oldali képen látható módon függőlegesen is állhat, hogy kevesebb helyet foglaljon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a robogót, ajánlott teljesen feltölteni az akkumulátorokat, mielőtt elteszi a robogót.
- Tárolja a robogót házon belül, fagymentes, száraz, jól szellőző helyen. A tárolási hőmérséklet 0-30 fokon ajánlott.
- Amikor buszon vagy mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas eszközön szállítja, az Eloflex robogót a biztonsági pontokon rögzíteni kell, ami az alsó képen látható. Ne feledje, hogy az Eloflex nincs tesztelve autó üléseként! Azt ajánljuk, hogy a használó mindig üljön át az autó ülésére.



# Hibakódok

## A kijelzőn megjelenő hibakódok

HIBAKÓD	A HIBA OKA	A HIBA JAVÍTÁSA
Bal/jobbs oldali mágnesszelep hiba	1. A bal/jobbs oldali motor mágneses fékje nyitva van. 2. A bal oldali motor mágneses fékjének csatlakozási hibája. 3. A bal oldali motor mágneses fékje elromlott, vagy a vezérlőegység megsérülhetett.	1. Zárja le a mágneses féket a piros fogantyú zárt helyzetbe húzásával. 2. Ellenőrizze, hogy a motor csatlakozása megfelelően van-e csatlakoztatva. 3. Forduljon a viszonteladójához segítségért.
Bal/jobbs túláram	1. Túl nagy ellenállás miatti túlfeszültség. 2. Motor vagy vezérlőegység hibája.	1. A rendszer visszaáll, amikor az ellenállás megszűnik. 2. Forduljon a kereskedőhöz segítségért.
Gyorsulás nem nulla	1. Az elzárókar nem „nulla állásban” van, amikor a szék az indítási tesztet végzi. 2. Vezérlőegység hibája.	1. Engedje el az elzárókart, és indítsa újra a robogót. 2. Forduljon a viszonteladójához segítségért.
Gyorsulási hiba	A zárókar vagy a vezérlőegység hibája.	Forduljon a viszonteladójához segítségért.
A vezérlőegység nem működik	Hiba a vezérlőegységben, vagy rossz típusú a vezérlőegység.	Cserélje le a vezérlőegységet.
Kapcsolódási hiba	1. Laza vagy helytelenül telepített csatlakozások. 2. Vezérlőegység hibája.	1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően van-e telepítve. 2. Forduljon a viszonteladójához segítségért.
Bal/jobbs meghajtó hiba	Vezérlőegység hibája.	Forduljon a viszonteladójához segítségért.
Tolórúd hiba	Rövidzárlat a hosszbeállító motorban, meghibásodott hosszbeállító motor vagy hiba a vezérlőegységben.	Ellenőrizze a hosszbeállító motorhoz való csatlakozást, vagy forduljon a viszonteladójához segítségért.
Túl magas az akkumulátor töltöttsége	Nem megfelelő típusú akkumulátor vagy elromlott akkumulátor.	Cserélje ki a 24 V-os akkumulátort.
Túl alacsony az akkumulátor töltöttsége	Az akkumulátor régi vagy nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki, ha elöregedett.
Szögérzékelő hiba	A szögérzékelő elromlott vagy csatlakozási hiba.	Forduljon a viszonteladójához segítségért.

## Biztonsági szabályok vezetés közben

A robogó billenése sérülésveszélyes.

- Csak olyan lejtőn használja, amely nem haladja meg a maximálisan megengedett lejtésszöveget.
- Az Eloflex vezetésekor mindig használja a borulásgátlót.
- A lejtőn lefelé vezetés történjen mindig alacsonyabb sebességgel.
- Kerülje azokat a területeket, ahol fennáll a jeges vagy csúszós felületek veszélye.
- Soha ne próbáljon felfelé vagy lefelé lépcsőzni a motoros robogóval.
- Soha ne haladjon olyan akadályokon, melyek magasabbak az ajánlott maximumnál.
- Kerülje a gyors kormánymozgásokat és a hirtelen irányváltoztatásokat vezetés közben.

Elakadásveszély távoli helyen.

- A nagymértékben mozgáskorlátozott felhasználó ne tegyen meg hosszabb távokat egyedül a szabadban.

Sérülésveszély, ha az egyik láb lecsúszik a lábtartóról, és vezetés közben a robogó alá kerül.

- Mindig tartsa a lábát a lábtartó közepén vezetés közben.

Sérülésveszélyes, ha összeütközik más tárgyakkal a keskeny utakon.

- Keskeny helyeken vezessen a legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel

Fennáll a robogó felborulásának veszélye, ha a felborulást gátló eszközöket eltávolítják, megsérülnek vagy a szabványos rögzítési helytől eltérő helyre szerelik.

- A borulásgátlók mindig legyenek felszerelve a robogó használata esetén.
- A borulásgátlók csak szilárd felületen működnek. Puha felületen, például gyepen és havon a borulásgátló elveszítheti a hatását. Ezért vezessen rendkívül óvatosan a puha felületeken.

## Olvassa el

**A robogó használójának el kell olvasnia az itt leírt biztonsági és vezetési útmutatásokat mielőtt használni kezdi az Eloflex robogót.**

## Gyakorlás

- Gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja az Eloflex robogó vezetését, irányítását egy segítővel, kezdetben nyílt, sík terepen, lehetőleg kültéren, mielőtt emberek között, boltokban, éttermekben stb. kezdené el használni.
- Haladjon előre a gyorsítógomb megnyomásával.
- Álljon meg a gomb felengedésével, vagy nyomja meg a szünet gombot az azonnali leálláshoz.

## Hátramenet

Tolasson vissza a hátramenet gomb megnyomásával, majd a gyorsító lenyomásával vezessen hátrafelé. Nyomja meg újra a hátramenet gombot a vezetési üzemmódba való visszaváltáshoz. Hátrafelé haladás előtt mindig nézzon hátra, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy nincsen az útjában sem személy sem más akadály.

## Forgás

**Forgáshoz** mozdítsa a kormányt finoman oldalra.

Vigyázzon, hogy semmi ne legyen az oldala útjában, amikor forog.

## Kanyarodás

**Kanyarodjon vezetés közben** úgy, hogy a kormányt óvatosan oldalirányban mozgatja, amerre kanyarodni kíván. Mindig csökkentse a sebességét kanyarodáskor.

## Akadály

**Gyakorolja** az akadályok kikerülését és az akadályokon való áthaladást. Menet közben mozgassa oldalra a kormányt az akadályok elkerüléséhez.

Mindig csökkentse a sebességét, ha akadályhoz közelít.

## Gyors haladás

Nyomja meg a plusz gombot a sebesség növeléséhez, ha gyorsan szeretne vezetni. Mindig húzza vissza kormányt és csökkentse sebességét, ha bizonytalannak érzi a haladást, illetve ha kanyarodik vagy akadályhoz közelít.

## Áthaladás akadályon

Haladjon lassan az akadályhoz, és bizonyosodjon meg róla, hogy az első kerekek a haladás irányának megfelelően állnak. Ezután nyomja meg a gyorsító gombot, miközben hátrahajolva áthajt az akadályon. Az Eloflex robogót maximum 6 fokos meredekségű emelkedőn / lejtőn tesztelték, és ez a megengedett.

## Haladás emelkedőn és lejtőn

**Próbáljon** egyenesen felfelé haladni az emelkedőn illetve lefelé haladni a lejtőn. Felfelé menet kissé dőljön előre, míg lefelé menet kissé dőljön hátra a súlypont középen tartása érdekében. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú haladást emelkedőn/lejtőn, és az esetleges oldalirányú megcsúszásokat kompenzálja ellenkező oldalirányba dőléssel. Mindig lassan haladjon emelkedőn és lejtőn. Kerülje a 9 fokosnál nagyobb emelkedőket/lejtőket.

## Liftek

Mindig ellenőrizze a lift ajtajának szélességét, valamint, hogy a lift ajtaja milyen gyorsan záródik, mielőtt beszállna a liftbe. Tartsa észben, hogy előfordulhat, hogy hátramenetben kell elhagynia a liftet, amennyiben a lift beltere nem elegendően nagy ahhoz, hogy megforduljon benne.

## Vezetés az úton

Elsősorban a sétányokat, járdákat, illetve a kerékpárutakat használja az Eloflex-szel, és csak végső esetben a forgalmas utakat.

## Átkelés úttesten

Amennyiben lehetséges, mindig kijelölt gyalogátkelőhelyet válasszon az úttesten való átkeléshez. Ügyeljen az útját keresztező autókra.

Használja a járda akadálymentesített szakaszát, ha van ilyen. Kerülje a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket.

## Általános biztonsági útmutatások

A robogó jelen dokumentumban ismertetett módoktól eltérő használata személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- A robogót kizárólag a jelen útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató „Típusbesorolás és felhasználási terület” pontját).

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a robogót csökkent vezetési képesség esetén használják.

- Ne használja a robogót, ha járművezetési képességei megromlottak, például betegség, gyógykezelés vagy alkoholos befolyásoltság miatt.

A robogó akaratlan mozgatása sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Kapcsolja ki a robogót, mielőtt beszáll vagy kiszáll belőle, vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön vagy egy másik személy vagy egy tárgy hozzáérhet a kormányhoz.
- Amikor a motorok kikapcsolt állapotban vannak, a fékek nem működnek. Emiatt a robogót kizárólag sík talajon szabad tolni, emelkedőn és lejtőn nem. Soha ne hagyja a robogót emelkedőn/lejtőn vagy annak közelében kikapcsolt motorokkal.

Személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár a robogó menet közbeni kikapcsolása például a be/ki kapcsoló gomb használatával vagy egy kábel kitépésével, mivel ez a robogó hirtelen megállását okozza.

- A gyorsabb megálláshoz engedje fel a gyorsító gombot, vagy nyomja meg a piros fék gombot.

A robogóból való kiesés sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Ne mozduljon előre, ne hajoljon előre a térdei között, és ne hajoljon át a robogó peremén, hogy például elérjen egy tárgyat.
- Mindig használjon biztonsági övet, és azt állítsa be újra minden indulás előtt.
- Amennyire csak lehet, álljon közel a másik üléshez, amibe át kíván szállni.

A robogó maximális terhelhetőségének túllépése személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Tartsa be a maximálisan megengedett terhelést (lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet a dokumentum végén).
- A robogót egyszerre egyetlen személy használhatja. Soha ne használja a robogót egyszerre egynél több személy szállítására.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a robogó sérülésének kockázatával jár a robogó használata, ha a zár nincs megfelelően a helyére rögzítve és használat közben kinyílik.

- Ha a robogó zárja nincs megfelelően a helyére kattintva, akkor megtörténhet, hogy a robogó használat közben hirtelen összecsuklik, ami a robogóról való leeséshez vezethet.
- Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítőkampó helyes pozícióban van mielőtt a robogót használja.

A robogó összecsukása személyi sérülés és az összenyomás miatti sérülés kockázatával járhat.

- Mindig az útmutatóban ismertetett módon állítsa és csukja össze a robogót.
- Figyeljen rá, hogy senki és semmi ne nyomódjon össze, amikor összeállítja és összecsukja a robogót.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a robogó sérülésének kockázatával jár a robogó nedves, párással, nyirkos helyen történő használata.

- A robogót tilos zuhanyzás közben használni.
- A robogót tilos fürdés közben használni.



# Biztonság

## Átkelés vasúti síneken

Mindig merőlegesen keljen át vasúti síneken, soha ne ferdén, rézsútosan.

Soha ne keljen át egyedül vasúti síneken, mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Éles peremek

Legyen óvatos, amikor meredek emelkedőkön, lejtőkön halad, mert a robogó törést szenvedhet. Az Eloflex robogót maximum 9 fokos meredekségű emelkedőn / lejtőn tesztelték, és ez a megengedett. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Magas peremek

Legyen óvatos, amikor egy szegélyre fel- vagy szegélyről lehajt. Az Eloflex robogót maximum 6 fokos meredekségű emelkedőn / lejtőn tesztelték, és ez a megengedett. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

## Átszállás

Javasoljuk, hogy mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek az Eloflex robogóról történő le- és felszállások során. Mindig kapcsolja ki a robogót mielőtt fel- vagy leszáll. Mozgás előtt mindig emelje fel a karfákat, hogy megkönnyítse az ülésre való fel- és leszállást.

## Ne javítsa egyedül

Soha ne kíséreljen meg önállóan megjavítani egy elromlott robogót. Ha megkísérli önállóan megjavítani az ülést, a jótállás érvényét veszti. Mindig forduljon az Eloflex-hez vagy ahhoz az üzlethez, viszonteladóhoz, ahonnan a robogót vásárolta. Soha ne végezzen saját maga módosításokat a robogón.

## Nem játék

Soha ne engedje meg gyerekeknek, akik saját maguk nem használnak robogót, hogy az Ön Eloflex robogóját használják vagy ráüljenek.

## Tisztítás

Soha ne tisztítsa Eloflex robogóját folyóvízzel. Csak törölje le nedves ruhával.

Ha az Eloflex robogója lassan nyílik és csukódik, megolajozhatja a csuklópontokat olajjal vagy szilikon spray-vel.

## Óvja a hőségtől

Soha ne hagyja Eloflex robogót közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy hőforrás közelében mert az akkumulátor károsodhat. Soha ne legyen nyílt láng közelében az Eloflex robogója.

Az Eloflex robogó -10 és +45 °C között használható. Fagyponthoz alacsonyabb hőmérséklet csökkenhet.

## Tárolás

Tartsa távol Eloflex robogóját gyermekektől, amikor nem használja.

Tárolja a robogót házon belül, fagymentes, száraz, jól szellőző helyen. Tárolási hőmérséklet 0 és +30 °C között.

## A töltő

Soha ne takarja le a töltőt, amikor Eloflex robogóját tölti vele. A töltő melegszik, és ez baleset vagy sérülés kockázatával jár.

## Akkumulátorok

Soha ne tárolja az akkumulátorokat közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, vagy olyan helyen, ahol fagyponthoz alacsonyabb hőmérséklet.

Tárolja az akkumulátort száraz, jól szellőző helyen.

# Műszaki adatok

## ADATOK ELOFLEX S1

<b>SÚLY</b>	41 kg 2 akkumulátorral együtt
<b>SEBESSÉG</b>	max. 9 km/h
<b>HATÓTÁV</b>	30 km
<b>MOTOR</b>	2 db kefe nélküli motor
<b>MOTOR TELJESÍTMÉNYE</b>	2 x 250 watt
<b>AKKUMULÁTOR</b>	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
<b>AKKUMULÁTOR SÚLYA</b>	1,6 kg/st
<b>TÖLTÉSI IDŐ</b>	3 óra
<b>FORDULÁSI SUGÁR</b>	100 cm
<b>MAX. EMELKEDŐ/LEJTŐ</b>	9 fok
<b>KEREKEK</b>	3 st 12" levegővel töltött
<b>ÜLÉSMAGASSÁG</b>	55-60 cm
<b>ÜLÉSSZÉLESSÉG</b>	45 / 50 / 55 cm
<b>ÜLÉSMÉLYSÉG</b>	40 cm
<b>MAX. TERHELÉS</b>	Max. 120 kg
<b>PÁRNA</b>	Műbőr
<b>MÉRET</b>	105-120 cm (M) x 63 cm (Sz) x 91 cm (H)
<b>ÖSSZECSUKOTT MÉRET</b>	105 cm (M) x 63 cm (Sz) x 55 cm (H)
<b>JÓTÁLLÁS</b>	2 év

A kerekek ajánlott nyomása = 2,5 kg.

## © Copyright Eloflex

Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt álló információkat tartalmaz, és az Eloflex írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, illetve sokszorosítható. Az Eloflex fenntartja magának a jogot a jelen dokumentumban előforduló esetleges tipográfiai hibákért, illetve fenntartja a termékváltoztatások jogát.



Sungo Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE  
Amszterdam, Hollandia  
SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd  
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

## Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Amennyiben kérdése van, illetve segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel. Ha közvetlenül kapcsolatba szeretne lépni velünk, a kapcsolattartási adatainkat a [www.eloflex.eu](http://www.eloflex.eu) honlapon találja.



**Eloflex**  
**Hammarbacken 4B**  
**191 49 Sollentuna**  
**SWEDEN**